

**P** ¿Cómo puedo obtener ayuda cuando me encuentre fuera del país?

**R** Su médico o enfermera pueden tener información sobre centros cardíacos internacionales. Asimismo, ellos podrían llamar al fabricante para obtener contactos. De otro modo, llame a una institución médica importante cuando llegue al destino de su viaje.

Contacto: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Clínica de DCI: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**P** ¿Cómo puedo obtener más información sobre mi DCI?

**R** El médico y la enfermera son las personas más indicadas para responder a sus preguntas sobre su DCI. Asimismo, si desea más información sobre los DCI de Medtronic, comuníquese con el Departamento de Servicios al Paciente de Medtronic, por medio del teléfono o la dirección que aparecen a continuación.

Medtronic, Inc.  
3850 Victoria St. N. V255  
Shoreview, MN 55126-2978

Patient toll-free line: 1-800-551-5544  
FAX: (763) 514-1855  
7:00 am to 6:00 pm CT Mon.-Fri.

**24-hour general information  
available on:  
<http://www.medtronic.com>**

UC199801790c SL  
© Medtronic, Inc. 2006  
Todos los derechos  
reservados.  
Impreso en los EE.UU.  
January 2006



## PREGUNTAS SOBRE VIAJES

El DCI\* en su vida diaria



*Restaurando los ritmos de vida.*

---

**P** Ahora que tengo un DCI, ¿podré viajar de manera segura?

**R** Sí. La mayoría de los pacientes con DCI viajan sin preocupaciones. Su DCI suministrará terapia cuando los latidos de su corazón sean demasiado rápidos o demasiado lentos, lo cual hará que se sienta más seguro cuando se encuentre de viaje.

Es importante que discuta sus planes de viaje con su médico o enfermera. Ellos le harán saber qué precauciones debe tomar y le darán instrucciones sobre el cuidado necesario en caso de emergencia.

**P** ¿Qué precauciones debo tomar siempre?

**R** ■ En el aeropuerto, deberá mostrar su tarjeta de identificación del DCI y pedir que lo registren manualmente. Los dispositivos de registro electrónico podrían detectar la caja metálica del DCI y activar la alarma. Sin embargo, su DCI funcionará normalmente. Cualquier movimiento repetido de un instrumento manual de registro podría interferir temporalmente con el funcionamiento del DCI.

■ Camine normalmente a través de los detectores contra robos en las entradas de tiendas, bibliotecas y museos. No se detenga en áreas adyacentes al equipo de detección.

---

**P** ¿Qué puedo hacer cuando haga viajes largos?

**R** Algunas sugerencias son:

- Lleve consigo la tarjeta de identificación del DCI.
- Lleve consigo sus pulseras o collares de identificación médica.
- Pídale al médico que le proporcione una hoja de cuidado de emergencia que incluya los ajustes del DCI. Esta hoja contiene información importante que explica cómo se le debe prestar asistencia médica en caso de emergencia.
- Tenga un plan para casos de emergencia (por ejemplo, si el dispositivo produce descargas repetidamente o usted no se siente bien). Hágale saber a sus compañeros de viaje que tiene un DCI. Dígales a qué deben atenerse y qué deben hacer si su DCI suministrara una descarga de alta energía o si usted se desmayara.
- Pregúntele a su médico si hay un centro cardíaco en el lugar de destino de su viaje, si hay alguien a quien puede llamar si tuviera preguntas o si se presentara alguna emergencia.
- Si no se encuentra cerca de un centro cardíaco, llame a otros servicios de emergencia para informarse sobre quién puede proporcionar asistencia a pacientes con DCI.

**P** ¿Qué ocurre si voy a estar de viaje en la fecha de mi cita de seguimiento?

**R** Las visitas de rutina son muy importantes. Si usted anticipa estar de viaje por dos meses o más, pídale a su médico que lo ayude a encontrar atención médica de seguimiento en el lugar de destino de su viaje.

---