

ProMRI®

Más accesibilidad. Más opciones.



BIOTRONIK SE & Co. KG Como una de las compañías líderes del mundo en la fabricación de dispositivos médicos cardiovasculares, con varios millones de dispositivos implantados, BIOTRONIK está representada en más de 100 países por más de 5600 empleados. Calidad, innovación y fiabilidad son las características que definen a BIOTRONIK y su creciente éxito, lo cual inspira confianza y proporciona seguridad tanto a médicos como a pacientes de todo el mundo.



© BIOTRONIK SE & Co. KG
Reservados todos los derechos. Las especificaciones pueden ser objeto de modificación, revisión y mejora.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin · Germany
Tel +49 (0)30 68905-0
Fax +49 (0)30 6852804
sales@biotronik.com
www.biotronik.com

ProMRI®

Información del paciente



ProMRI®

• seguridad para usted

¿Qué significa IRM?

La IRM, o imagen de resonancia magnética, es una avanzada tecnología que permite que los médicos vean con detalle las imágenes de sus estructuras y órganos internos mediante potentes imanes, ondas electromagnéticas y equipos informáticos. Hasta hace poco, los pacientes que llevaban un dispositivo cardíaco implantable no podían someterse a las exploraciones de IRM debido a los fuertes campos magnéticos presentes durante la exploración.

¿Qué significa ProMRI®?

La nueva tecnología ProMRI® de BIOTRONIK permite a los pacientes que llevan un sistema de marcapasos someterse de forma segura a exploraciones de IRM bajo ciertas condiciones.

Los marcapasos ProMRI® de BIOTRONIK incluyen las últimas innovaciones para proporcionarle la terapia óptima, y a su vez, poder someterle a pruebas diagnósticas de IRM.



Si un médico le prescribe una exploración de IRM, ¿hay algo específico que deba hacer?

Al programar la exploración de IRM, mencione al radiólogo que lleva un marcapasos que puede someterse a una exploración de IRM. Además, asegúrese de contactar con el cardiólogo, el cual tomará todas las medidas necesarias para preparar su dispositivo para la exploración. Cuando llegue a la consulta del radiólogo, solamente tendrá que mostrar su tarjeta de identificación del marcapasos.

¿Qué sucederá ANTES de la IRM?

Antes de la exploración, el cardiólogo programará su marcapasos con un ajuste especial ProMRI®, que evitará las interferencias del escáner de IRM con su dispositivo cardíaco.

¿Qué sucederá DURANTE la IRM?

Su marcapasos ProMRI® se ha diseñado y probado específicamente para utilizarlo en un aparato de IRM. En lo que concierne al procedimiento de la exploración, no habrá diferencia alguna con una exploración convencional de un paciente sin marcapasos.

¿Qué sucederá DESPUÉS de la IRM?

Después de la exploración, deberá visitar de nuevo al cardiólogo para que pueda programar de nuevo su marcapasos con los ajustes previos a la exploración. La exploración de IRM no tiene ningún efecto sobre el funcionamiento y la terapia regular de su dispositivo.

No olvide llevar su tarjeta de identificación de marcapasos al radiólogo el día de su exploración de IRM.

Para obtener más información sobre ProMRI®, visítenos en: www.biotronik.com/promri